



易博士 E-FOAM 高效泡沫保湿剂说明书

主要有效成分：

由强效杀菌因子、表面活性剂、保湿防锈因子、稳泡剂、螯合剂等组成。

产品特点：

- ❖ 快速杀菌，作用 2min 即可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌；
- ❖ 持久抑菌，抑菌时间 48 小时以上；
- ❖ 泡沫绵密持久，对器械长效保湿 24 小时，并有效防止锈渍产生；
- ❖ 可有效分解去除器械表面血液等污染物；
- ❖ pH 值中性，对器械无损伤；安全无毒，所有成分均可生物降解。

适用范围：

产品适用于各类手术器械的长效保湿预处理。

使用方法：

本品配合易博士 E-FOAM 泡沫发生器使用，即开即用、无需稀释。

注：用后需冲洗干净。

注意事项：

- ❖ 操作人员应佩戴防护用具（请参照相关国家行业规范）；
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触；
- ❖ 本品不慎接触眼睛或粘膜，请用大量清水冲洗，如仍有不适请及时就医。

运输和贮存条件：

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤，防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

产品有效期： 24 个月

产品执行标准： Q/DLE 001

产品包装规格： 5L/桶，4 桶/箱；1L/桶，12 桶/箱。

