



易博士中性多酶清洗剂（BASIC TYPE）说明书

主要有效成分：

产品由蛋白酶、脂肪酶、酶活力保护剂、非离子表面活性剂、螯合剂等复合而成。

产品特点：

- ❖ 产品高性价比，可满足临床手术器械清洗的基本需求；
- ❖ 能够迅速润湿手术器械，优异的乳化能力可有效去除手术器械上的生物负荷；
- ❖ 成分温和，中性pH值不会对手术器械造成损伤；
- ❖ 产品环保，所有成分均可生物降解。

适用范围：

适用于各类自动清洗系统对各类手术器械、器具、牙科手机等的清洗处理。

使用方法：

- ❖ 稀释比例：推荐配比1：270，最高稀释比例1：500，请根据清洗方式和水质酌情调整使用比例。
- ❖ 建议水温：25-60℃，在此范围内温度越高效果越好。
- ❖ 操作方法：
【手洗】器械拆至最小单位，打开器械关节，浸泡在配比液中5分钟后再清洗，必要时可选择专用软刷水面下刷洗。
【机洗】调整清洗机的稀释比例和清洗温度、时间（5-15分钟）进行自动清洗程序即可。

注意事项：

- ❖ 操作人员应佩戴防护用具（请参照相关国家行业规范）。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 如本品不慎入眼，请用大量水冲洗，如仍不适请及时就医。

运输和贮存条件：

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

产品有效期：24个月。

产品执行标准：Q/DLE 001

产品包装规格：5L/桶，4桶/箱。

