



易博士器械润滑保护剂（BASIC TYPE）说明书

主要有效成分：

产品由医用级基础油、非离子表面活性剂、螯合剂、缓蚀剂等组成。

产品特点：

- ❖ 产品为完全水溶性，性质稳定不分层，器械烘干后不留白斑，完全满足用户对器械润滑保养的基本需求；
- ❖ 在器械表面形成保护层，不影响灭菌因子穿透；
- ❖ 产品环保，所有成分均可生物降解。

适用范围：

产品具有广泛的材料兼容性。适用于各类手术器械和诊疗器械的手工润滑及各类自动清洗系统的润滑程序。

使用方法：

- ❖ 稀释比例：推荐配比1：270，最高稀释比例1：500，请根据清洗方式和水质酌情调整使用比例。
- ❖ 操作方法：
【手洗】将器械完全打开浸泡在配比液中，浸泡时间60秒。取出后沥干或干燥处理，再进入消毒程序。
【机洗】全自动清洗系统可控制在7min 左右，于75-90℃温度下喷淋后烘干即可。

注意事项：

- ❖ 操作人员应佩戴防护用具（请参照相关国家行业规范）。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 如本品不慎入眼，请用大量水冲洗，如仍不适请及时就医。

运输和贮存条件：

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

产品有效期：24个月。

产品执行标准：Q/DLE 001

产品包装规格：5L/桶，4桶/箱。

