



易博士新器械润滑保护剂说明书

主要有效成分:

产品由医用级基础油、非离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、螯合剂及其他助剂组成。

产品特点:

- ❖ 产品为无色、无毒、水溶性医用润滑油，符合高温高压蒸汽、环氧乙烷和过氧化氢等离子体等灭菌因子穿透的要求，并且具有良好的人体兼容性；
- ❖ 理化性质稳定，不增加任何增稠剂；彻底解决传统润滑剂分层问题以及器械表面残留的白斑问题；
- ❖ 为器械提供全方位的润滑保护，保持器械关节处的灵活性，使器械光亮如新；
- ❖ 产品环保，所有成分均可生物降解。

适用范围:

产品具有广泛的材料兼容性。适用于各类手术器械和诊疗器械的手工润滑及各类自动清洗系统的润滑程序。

使用方法:

- ❖ 稀释比例：**【手洗】** 1:20-50 (20-50mL 本品/1L 水)
【机洗】 1:100-500 (2-10mL 本品/1L 水)
- ❖ 操作方法：
【手洗】 将器械完全打开浸泡在配比液中，浸泡时间 30 秒-45 秒。取出后沥干或干燥处理，再进入消毒程序。
【机洗】 全自动清洗系统可控制在 5min 左右，于 65-90℃ 温度下喷淋后烘干即可。

注意事项:

- ❖ 操作人员应佩戴防护用具（请参照相关国家行业规范）。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 如本品不慎入眼，请用大量水冲洗，如仍不适请及时就医。

运输和贮存条件:

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

产品有效期: 24 个月。

产品执行标准: Q/DLE 001

产品包装规格:

10L/桶，2 桶/箱；5L/桶，4 桶/箱；2.5L/桶，6 桶/箱；1L/桶，12 桶/箱。

