



易博士生物膜去除剂说明书

主要有效成分:

产品由非离子表面活性剂、阳离子表面活性剂、苛性碱、螯合剂、阻垢剂等组成。

产品特点:

- ❖ pH 值碱性 (≥ 7.5)，独有的成分配方可破坏生物膜的表面粘附力，溶解 EPS，破坏生物膜并抑制其再生，并可迅速去除人体分泌物、蛋白质、脂类、粘多糖等污染物；
- ❖ 去污能力与清洗效果不受水质的影响；
- ❖ 产品可有效防止清洗过程中的污垢再次沉积于器械表面；
- ❖ 产品环保，可生物降解、无异味、无残留。

适用范围:

产品适用于不锈钢手术器械及不锈钢制品的预浸泡、手工清洗、超声波清洗机以及全自动清洗消毒机的清洗

使用方法:

- ❖ 稀释比例：污染物程度配比参考表：

污染程度	配比建议
轻度污染	1: 300-500 (2-3.3mL 清洗剂/1L 水)
中度污染	1: 200-300 (3.3-5mL 清洗剂/1L 水)
重度污染	1: 100-200 (5-10mL 清洗剂/1L 水)

可视实际情况调整配比，手洗和超声清洗稀释比例建议参照重度污染配比；清洗机、清洗长龙可参照轻度-中度污染程度配比。

- ❖ 建议水温：20-40℃。
- ❖ 操作方法：

【手洗】器械拆至最小单位，打开器械关节，浸泡在配比液中至少 2-5 分钟后刷洗，必要时可选用专用软刷水面下刷洗。

【机洗】调整清洗机的稀释比例和清洗温度、时间（2-10 分钟）进行自动清洗程序即可。

注意事项:

- ❖ 产品呈碱性，不适用于橡胶及塑料制品的清洗。
- ❖ 操作人员应佩戴防护用具（请参照相关国家行业规范）。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 产品颜色可能因长时间存放有变化，不影响正常使用。
- ❖ 如本品不慎入眼，请用大量水冲洗，如仍不适请及时就医。

运输和贮存条件:

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

产品有效期：24 个月。

产品执行标准：Q/DLE 001

产品包装规格:

10L/桶，2 桶/箱；5L/桶，4 桶/箱；2.5L/桶，6 桶/箱；1L/桶，12 桶/箱。

