



易博士全效多酶清洗剂（杀菌型）说明书

主要有效成分：

产品由强效杀菌因子、蛋白酶、淀粉酶、纤维素酶、非离子表面活性剂、缓蚀剂、酶活保护剂等成分通过专有技术复合而成。

产品特点：

- ❖ 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌；
- ❖ 器械兼容性好，温和无损伤，各类材质器械均适用；
- ❖ 迅速分解并清除手术器械表面与隐藏处的血渍、体液及其他人体组织等各种污染物；
- ❖ 易清洗，无残留，对操作人员无伤害；
- ❖ 产品环保，所有成分均可生物降解。

适用范围：

适用于各类材质手术器械的预处理，及手工和机洗清洗流程。

使用方法：

- ❖ 使用温度 25-60℃。
- ❖ 杀菌功能预处理/清洗：产品配比 1: 300，作用时间 2min 即可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。
- ❖ 常规预处理/清洗：产品配比根据器械污染程度调整：轻度污染：1:300-500、中度污染：1:200-300、重度污染：1:100-200、干涸 1:50，作用时间 5-10min。具体请参照清洗相关规范。

注意事项：

- ❖ 本品不可替代消毒剂使用。
- ❖ 操作人员应佩戴防护用具，避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 如不慎入眼，请用大量水冲洗，仍不适请及时就医。

运输和贮存条件：

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

产品有效期： 24 个月。

产品执行标准： Q/DLE 001

产品包装规格：

5L/桶，4 桶/箱；2.5L/桶，6 桶/箱；1L/桶，12 桶/箱。

