



易博士全效多酶清洗剂（BASIC TYPE）说明书

主要有效成分：

产品由蛋白酶、淀粉酶、非离子表面活性剂、缓蚀剂、酶活力保护剂等组成。

产品特点：

- ❖ 产品可针对不同材质手术器械进行有效清洗，配方成分协同配合，达到有效的润湿、乳化分解的目的；
- ❖ 可有去除血液、脂肪等有机和无机污染物的同时，亦可分解胆汁、粘液等特殊污染物，用于内镜的清洗；
- ❖ 产品环保，所有成分均可生物降解。

适用范围：

适用于各类自动清洗系统和手工清洗，同样适用于窥镜类的清洗。

使用方法：

- ❖ 稀释比例：推荐配比1：270，最高稀释比例1：500，请根据清洗方式和水质酌情调整使用比例。
- ❖ 建议水温：30-55℃，在此范围内温度越高效果越好。
- ❖ 操作方法：

【手洗】将器械拆解至最小单位，器械关节打开至最大，根据污染程度不同浸泡5-10分钟后漂洗。

【机洗】调整清洗机的稀释比例和清洗温度、时间（5-15分钟）进行自动清洗程序即可。

注意事项：

- ❖ 操作人员应佩戴防护用具（请参照相关国家行业规范）。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 如本品不慎入眼，请用大量水冲洗，如仍不适请及时就医。

运输和贮存条件：

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

产品有效期：24个月。

产品执行标准：Q/DLE 001

产品包装规格：5L/桶，4桶/箱。

