



易博士腔镜专用多酶清洗剂说明书

主要有效成分:

产品由蛋白酶、脂肪酶、糖酶等多种精制酶通过专有技术复合而成，其中添加非离子表面活性剂、螯合剂、酶活保护剂等组成。

产品特点:

- ❖ 腔镜专用，根据腔镜污染物类别特别设计，可快速有效去除血液、脂肪等污染物；
- ❖ pH 值中性（6.5-7.5），无腐蚀性，无研磨剂，易过水冲洗，对腔镜器械温和和无损伤；
- ❖ 产品环保，所有成分均可生物降解。

适用范围:

适用于各类腔镜器械的预处理和清洗。

使用方法:

- ❖ 稀释比例：污染物程度配比参考表：

污染程度	配比建议
轻度污染	1: 300-500 (2-3.3mL 清洗剂/1L 水)
中度污染	1: 200-300 (3.3-5mL 清洗剂/1L 水)
重度污染	1: 100-200 (5-10mL 清洗剂/1L 水)
干涸	1: 50 (20mL 清洗剂/L 水)

根据实际情况调整配比，手洗稀释比例建议参照重度/干涸污染配比；机洗建议参照轻度/中度污染配比。

- ❖ 建议水温：20-50℃
- ❖ 操作方法：【手洗】器械拆至最小单位，浸泡在本品配比液中 2-10 分钟后再清洗，管腔应用高压水枪冲洗，有必要时可用专用软刷水面下刷洗。【机洗】调整清洗机的稀释比例和清洗温度、时间（2-10 分钟）进行自动清洗程序即可。

注意事项:

- ❖ 操作人员应佩戴防护用具（请参照相关国家行业规范）。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 如本品不慎入眼，请用大量水冲洗，如仍不适请及时就医。

运输和贮存条件:

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

产品有效期：24 个月。

产品执行标准：Q/DLE 001

产品包装规格：5L/桶，4 桶/箱；2.5L/桶，6 桶/箱；1L/桶，12 桶/箱。

