



易博士碱性清洗剂说明书

主要有效成分:

产品由碱、非离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、缓蚀剂、螯合剂等组成。

产品特点:

- ❖ 去污能力超强，尤其针对油脂类污染物分解速度更加迅速，使得器械表面焕然一新。
- ❖ 无异味，硬、软、冷或热水使用均可保持强劲的去污能力和杰出的清洗效果。
- ❖ pH 值碱性 (≥ 7.5)。
- ❖ 产品环保，可生物降解，不包含磷酸盐或氮川三乙酸。

适用范围:

适用于手工、喷淋与超声波清洗机的清洗。

使用方法:

- ❖ 稀释比例: 1:100-500 (根据污染程度酌情处理) 适宜温度: 20-65℃
- ❖ 操作方法:

【手洗】浸泡2分钟后进行刷洗。

【机洗】直接放入机洗的清洁剂置入槽中并调整稀释比例即可。

注意事项:

- ❖ 产品呈碱性，不适用于橡胶及塑料制品的清洗。
- ❖ 操作人员应佩戴防护用具 (请参照相关国家行业规范)。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 产品颜色可能因长时间存放有变化，不影响正常使用。
- ❖ 如本品不慎入眼，请用大量水冲洗，如仍不适请及时就医。

运输和贮存条件:

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温 (10-30℃)，避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

产品有效期: 24 个月。

产品执行标准: Q/DLE 001

产品包装规格:

10L/桶, 2 桶/箱; 5L/桶, 4 桶/箱; 2.5L/桶, 6 桶/箱。

