



## 易博士除锈除垢剂说明书

### 主要有效成分:

产品由水溶性植物酸、非离子表面活性剂、缓蚀剂等组成。

### 产品特点:

- ❖ 可迅速去除金属表面的锈渍及水垢，并能有效抑制金属锈蚀和水垢的形成；
- ❖ 医用级原料，安全除锈除水垢的同时，可有效降低器械返锈率并延长器械的使用寿命；
- ❖ 产品环保，所有成分均可生物降解。

### 适用范围:

产品适用于各类不锈钢器械和器皿表面除锈、除水垢。

### 使用方法:

- ❖ 稀释比例：手工除锈除水垢 1:5-10（100-200mL 清洗剂/1L 水）；超声除水垢 1:50（20mL 清洗剂/1L 水）。
- ❖ 建议水温：手工除锈除水垢 50-80℃，在此范围内温度越高去除效果越好。
- ❖ 操作方法：

【手工除锈除水垢】完全打开器械关节后置于配比液 2-10 分钟。器械存在严重的锈渍和水垢时可使用专业器械刷刷洗，并可重复该步骤，以达到最佳效果。

【机洗除水垢】清洗机除水垢时，可将本品置于弯盘内，置于清洗机中，启动清洗程序即可。

### 注意事项:

- ❖ 操作人员应佩戴防护用具（请参照相关国家行业规范）。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 如本品不慎入眼，请用大量水冲洗，如仍不适请及时就医。

### 运输和贮存条件:

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

产品有效期：24 个月。

产品执行标准：Q/DLE 001

产品包装规格：5L/桶，4 桶/箱； 1L/桶，12 桶/箱。

