



## AMEDPAK<sup>®</sup> 灭菌指示包装袋说明书

### 产品说明:

本品是带有压力蒸汽(STEAM)和环氧乙烷(EO)灭菌标识的包装材料,由 PET/PP 复合膜与医用透析纸烫合而成,通过指示色块的颜色变化,区分该包装是否经过灭菌处理。

### 使用范围:

适用于医疗器械的压力蒸汽、环氧乙烷的灭菌包装。

### 使用方法:

1. 将干燥、清洁的物品放入包装袋内进行热封,参考温度 155℃-180℃(取决于密封压力和时间),封口后应确保其完整(无褶皱)且紧闭。
2. 灭菌物品的总体积以不超过包装袋的 3/4 为宜;为使气体或蒸汽顺利流通,竖立摆放于灭菌容器内。
3. 常规的压力蒸汽灭菌后,指示色块由蓝色变为灰黑色。
4. 常规的环氧乙烷灭菌后,指示色块由粉色变为棕色。

### 贮存方法:

阴凉干燥、环境温度 10-40℃,相对湿度 30%-60%条件下避光保存。

### 注意事项:

1. 灭菌过程需参照《消毒产品技术规范》进行操作。
2. 指示标识的变色只证明经过灭菌,并不能验证灭菌效果。
3. 包装袋破损严禁使用。

### 执行标准:

GB/T 19633、GB 18282.1、YY/T 0698.5。

产品有效期: 24 个月

消毒产品生产企业许可证号: (辽)卫消证字(2019)第 0202 号。

包装规格: 见附页(可根据客户需求定制)





附页：

MEDPAK®灭菌指示包装袋包装规格

品名	规格	型号	单位	装箱
MEDPAK®灭菌指示包装袋 (热封型平面卷袋)	55mm*200m	60g/70g	卷	6
	75mm*200m	60g/70g	卷	5
	100mm*200m	60g/70g	卷	4
	150mm*200m	60g/70g	卷	2
	200mm*200m	60g/70g	卷	2
	250mm*200m	60g/70g	卷	2
	300mm*200m	60g/70g	卷	1
	350mm*200m	60g/70g	卷	1
	400mm*200m	60g/70g	卷	1
MEDPAK®灭菌指示包装袋 (热封型立体卷袋)	(75+25) mm*100m	60g/70g	卷	5
	(100+50) mm*100m	60g/70g	卷	4
	(150+50) mm*100m	60g/70g	卷	2
	(200+55) mm*100m	60g/70g	卷	2
	(250+60) mm*100m	60g/70g	卷	2
	(300+65) mm*100m	60g/70g	卷	1
	(350+70) mm*100m	60g/70g	卷	1
	(400+75) mm*100m	60g/70g	卷	1
MEDPAK®灭菌指示包装袋 (自封型平口袋)	57mm*100 (130) mm	60g/70g	个	200 个/盒, 60 盒/箱
	90mm*230 (260) mm	60g/70g	个	200 个/盒, 20 盒/箱
	135mm*255 (285) mm	60g/70g	个	200 个/盒, 18 盒/箱
	190mm*330 (360) mm	60g/70g	个	200 个/盒, 6 盒/箱
	250mm*370 (400) mm	60g/70g	个	200 个/盒, 6 盒/箱
MEDPAK®灭菌指示包装袋 (热封型平口袋)	57mm*100mm	60g/70g	个	200 个/盒, 60 盒/箱
	90mm*230mm	60g/70g	个	200 个/盒, 20 盒/箱
	135mm*255mm	60g/70g	个	200 个/盒, 18 盒/箱
	190mm*330mm	60g/70g	个	200 个/盒, 6 盒/箱
	250mm*370mm	60g/70g	个	200 个/盒, 6 盒/箱

生产厂家：大连莱恩医疗工业有限公司  
 地址：辽宁省大连保税区庆港街2-1号  
 邮编：116600

电话：+86 0411 88163166  
 邮箱：market@lionindustry.cn  
 网址：www.lionmedical.cn



莱恩医疗  
LION MEDICAL

