



易博士医用包装无纺布说明书

产品说明：

本品为五层(SSMMS/SMMMS)复合无纺布，聚丙烯超细纤维制成，为各类复用诊疗器械创建无菌屏障。

产品特点：

- 1、无菌保存期为180天；
- 2、环保材料，无毒、不致敏；
- 3、具有良好的疏水性、抗张力以及微生物屏障性能。

适用范围：

- 1、压力蒸汽灭菌；
- 2、环氧乙烷灭菌；
- 3、过氧化氢低温等离子体灭菌等。

使用建议：

- 1、配合易博士医用吸水纸使用，避免“湿包”产生；
- 2、压力蒸汽灭菌时，建议2kg以上器械篮筐或底部有局部受力点的金属器械盒下，配合垫巾使用，以防与金属接触部分的无纺布因温度过高导致熔化，造成“破包”；
- 3、转运过程中存在破包风险时，建议在包裹外增加保护性包装；
- 4、本品为一次性产品，禁止重复使用。

操作方法：

- 1、应采用双层双次包装方式；
- 2、采用“信封折叠”或“方形折叠”。

执行标准：YY/T 0698.2

产品有效期：5 年

医用包装无纺布
信封折叠示意图

