



## 易博士医用包装皱纹纸说明书

### 产品成分：

全部采用达到国际标准的ECF全木浆制作，无异味、不掉纤维、不掉屑，无任何毒性，可确保使用安全。

### 使用范围：

7公斤以下的手术器械的包装。（参考CSSD管理标准WS 310-2016）

### 操作方法及适用范围：（双层双次打包）


#### “方形折叠”或“直线法”

- ◆ 主要用于包装包裹和成套器械；
- ◆ 将包装用于创建无菌屏障时，采用采用“信封折叠”或“对角线法”；
- ◆ 大部分成套器械的最小包装；
- ◆ 单个物品的包装。

### 产品特点：

- ◆ 无菌保存期为180天；
- ◆ 避免“湿包”形成；
- ◆ 绿色环保材料，无尘无毒；
- ◆ 低收缩率，有效避免灭菌后“爆袋”现象；
- ◆ 较好的抗水性及抗撕裂性。

执行标准：YY/T 0698.2

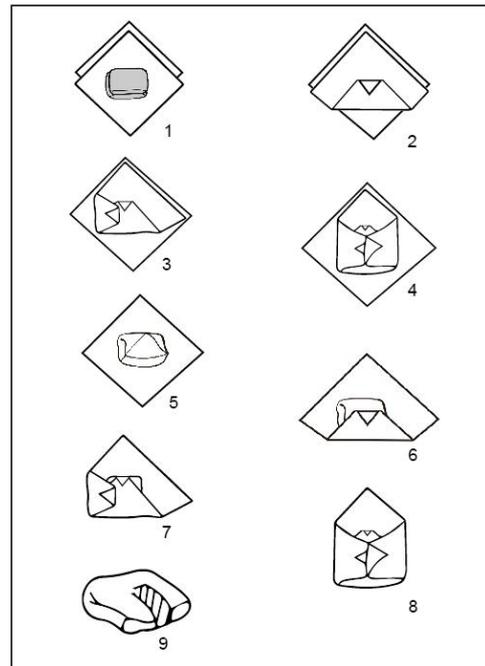

### 使用建议：

- ◆ 考虑产品的顺应性和承重力，推荐使用易博士皱纹纸包装小型包裹；
- ◆ 可与易博士无纺布配合使用，建议大型手术器械使用易博士无纺布包装；
- ◆ 适用于压力蒸汽、环氧乙烷等多种灭菌方式。

产品有效期：5年

