



易博士手术机器人专用多酶清洗剂说明书

主要有效成分：

产品由蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、糖酶、渗透剂、缓蚀剂、酶活力稳定剂等组成。

产品特点：

- ❖ 专为手术机器人研制，高效复合酶可有效去除器械上的血液、脂肪等污染物。
- ❖ pH 值中性，专有成分可在去污同时全方位保护手术机器人器械。
- ❖ 活性渗透因子可快速渗入器械端头狭小缝隙，清洗更彻底。
- ❖ 产品环保，所有成分均可生物降解。

适用范围：

适用于手术机器人等精密器械的预清洗及清洗流程。

使用方法：

- ❖ 稀释比例：1:100-500
- ❖ 建议水温：20-60℃
- ❖ 操作方法：

【手洗】将器械完全浸泡于配比液中，使用流动水和洁净清洗刷彻底清洗整个器械。

【机洗】调整清洗机的稀释比例和清洗温度、时间（5-10 分钟）进行自动清洗程序即可。

注意事项：

- ❖ 操作人员应佩戴防护用具（请参照相关国家行业规范）。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 如本品不慎入眼，请用大量水冲洗，如仍不适请及时就医。

运输和贮存条件：

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

产品有效期：24 个月。

产品执行标准：Q/DLE 001

产品包装规格：5L/桶，4 桶/箱。

