



## 易博士中性多酶清洗剂（减压沸腾机专用型）说明书

### 主要有效成分：

产品由蛋白酶、淀粉酶、脂肪酶、纤维素酶等多种酶通过专有技术复合而成，其中添加表面活性剂、金属腐蚀抑制剂、复合酶稳定剂等组成。

### 产品特点：

- ❖ 专为减压沸腾清洗机研制，独有的无泡配方，易漂洗。
- ❖ 高效活性酶技术迅速分解去除血渍、脂肪等污染物，配套减压沸腾清洗机，使管腔等复杂精密器械清洗更彻底。
- ❖ 各类材质和性状器械可混合清洗，统一洗净。
- ❖ pH 值中性，性质温和，对器械无腐蚀。

### 适用范围：

配合减压沸腾式清洗机、负压脉动清洗机使用，适用于各类管腔等复杂精密器械清洗。

### 使用方法：

- ❖ 稀释比例：1:200-500
- ❖ 建议水温：20-60℃
- ❖ 操作方法：

调整清洗机的稀释比例和清洗温度、时间（10-30 分钟）进行自动清洗程序即可。

### 注意事项：

- ❖ 操作人员应佩戴防护用具（请参照相关国家行业规范）。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 如本品不慎入眼，请用大量水冲洗，如仍不适请及时就医。

### 运输和贮存条件：

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

**产品有效期：**24 个月。

**产品执行标准：**Q/DLE 001

**产品包装规格：**5 L/桶，4 桶/箱。

