



易博士眼科专用碱性清洗剂说明书

主要有效成分：

产品由无机去污因子、螯合剂、缓蚀剂、苛性碱等组成。

产品特点：

- ❖ 专为眼科器械研发，无表面活性剂配方，无泡，无残留。
- ❖ 高效去除器械表面污染物，可避免眼前节毒性综合征（TASS）的发生。
- ❖ 材料兼容性强，对眼科精密器械或特殊精密器械无损伤。

适用范围：

适用于眼科复杂精密的眼内手术器械的手工清洗和全自动清洗机及减压沸腾清洗机等
各类机械清洗。

使用方法：

- ❖ 稀释比例：手工清洗 1:100-500；机械清洗 1:300-500。
- ❖ 建议水温：20-60℃
- ❖ 操作方法：**【手洗】**浸泡 2 分钟后进行刷洗。
【机洗】放入机洗的清洁剂置入槽中并调整稀释比例即可。

注意事项：

- ❖ 使用后立即使用酸性中和剂。
- ❖ 漂洗阶段，应使用大量去离子水漂洗。
- ❖ 操作人员应佩戴防护用具（请参照相关国家行业规范）。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 如本品不慎入眼，请用大量水冲洗，如仍不适请及时就医。

运输和贮存条件：

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

产品有效期：24 个月。

产品执行标准：Q/DLE 001

产品包装规格：5L/桶，4 桶/箱。

