



## 易博士眼科专用酸性中和剂说明书

### 主要有效成分：

产品由无机弱酸等组成。

### 产品特点：

❖ 不含表面活性剂，中和后无附着残留物。

### 适用范围：

适用于眼内手术器械或其他精密器械在碱性清洗后的中和。

### 使用方法：

❖ 稀释比例：1:500-1000

❖ 建议水温：20-40℃

❖ 操作方法：

用于浸泡槽内：浸泡中和后进行漂洗。

用于清洗消毒器内：放入机洗的清洁剂置入槽中并调整稀释比例即可。

### 注意事项：

- ❖ 使用酸性中和剂后，需充分漂洗器械，去除残留。
- ❖ 操作人员应佩戴防护用具（请参照相关国家行业规范）。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 如本品不慎入眼，请用大量水冲洗，如仍不适请及时就医。

### 运输和贮存条件：

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

**产品有效期：**24个月。

**产品执行标准：**Q/DLE 001

**产品包装规格：**5L/桶，4桶/箱。

