



易博士器械预处理保湿凝胶说明书

主要有效成分:

产品由表面活性剂、保湿因子及助剂组成。

产品特点:

- ❖ 可对器械进行长效保湿，达 72 小时以上，能快速溶解污垢，达到预清洗和器械保护目的，透明凝胶状态更易于观察器械；
- ❖ 温和的成分配方对各类器械均无损伤，易生物降解；
- ❖ 产品环保，所有成分均可生物降解。

适用范围:

产品适用于各类手术器械及内镜等长效保湿处理。

使用方法:

距离器械 15-20cm 处喷洒 5-10 次（根据器械状况），使产品直接充分均匀覆盖在器械表面。器械回收后可直接进入清洗程序。

注意事项:

- ❖ 操作人员应佩戴防护用具（请参照相关国家行业规范）。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 如本品不慎入眼，请用大量水冲洗，如仍不适请及时就医。

运输和贮存条件:

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

产品有效期: 18 个月

产品执行标准: Q/DLE 001

产品包装规格: 500mL/瓶，12 瓶/箱。

