



易博士内镜专用多酶清洗剂（预处理型）说明书

主要有效成分：

产品由蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、酶活力稳定剂、表面活性剂等组成。

产品特点：

- ❖ 可有效去除内镜管腔内污染物及内镜生物膜。
- ❖ 即开即用、使用便捷。
- ❖ 安全环保，一镜一袋，避免交叉感染。

适用范围：

适用于各类内镜及器械的预处理。

使用方法：

内镜使用后，立即用内镜专用清洗海绵蘸取本品适量擦去外表面污物；将内镜的前端置于装有清洗剂的直立袋中，抽吸清洗剂至其流入内镜吸引管。

注意事项：

- ❖ 操作人员应佩戴防护用具（请参照相关国家行业规范）。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 如本品不慎入眼，请用大量水冲洗，如仍不适请及时就医。

运输和贮存条件：

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

产品有效期：24个月

产品执行标准：Q/DLE 001

产品规格：300mL/袋

