



易博士快干上光剂说明书

主要有效成分:

产品由天然基础油、表面活性剂、快干助剂、螯合剂等组成。

产品特点:

- ❖ 可有效缩短器械烘干时间，避免长时间高温对器械的损伤，并在器械表面形成保护膜，增加器械的光泽度，延长器械的使用寿命；
- ❖ 软水、硬水均适用，抑制结晶水滴的形成；
- ❖ 满足零污点要求，去除斑点和污物，降低再次清洁的概率；
- ❖ 产品环保，所有成分均可生物降解。

适用范围:

本产品适用于各类手术器械的手工清洗、超声波清洗机以及全自动清洗消毒机。

使用方法:

- ❖ 稀释比例：1:300-500（2-3.3mL 本品/1L 水）。
- ❖ 操作方法：
【手洗】将器械完全打开浸泡在稀释液中，浸泡30秒后取出，再进入消毒程序。
【机洗】全自动清洗系统可控制在5min左右，于65-90℃温度下喷淋后烘干即可。

注意事项:

- ❖ 操作人员应佩戴防护用具（请参照相关国家行业规范）。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 如本品不慎入眼，请用大量水冲洗，如仍不适请及时就医。

运输和贮存条件:

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

产品有效期：24 个月。

产品执行标准：Q/DLE 001

产品包装规格:

10L/桶，2 桶/箱；5L/桶，4 桶/箱；2.5L/桶，6 桶/箱；1L/桶，12 桶/箱。

