



## 易博士不锈钢炫彩增亮剂说明书

### 主要有效成分:

产品由渗透剂、螯合剂、光亮剂、养护剂等成分组成。

### 产品特点:

- ❖ 可常温使用并迅速去除不锈钢设备表面锈蚀、点蚀、水垢等污渍;
- ❖ 恢复不锈钢表面光洁如新,防止锈渍形成,延长使用寿命;
- ❖ 乳液性状,非喷溅式出液有效避免气溶胶的产生,更好地保护工作人员;
- ❖ 弱碱性、无腐蚀;
- ❖ 绿色安全环保、无毒无刺激。

### 适用范围:

产品适用于灭菌器、全自动清洗机、以及不锈钢打包台、转运车等各类不锈钢制品表面。

### 使用方法:

使用前摇匀,取适量产品于清洁干燥的毛巾,擦拭不锈钢表面。

### 注意事项:

- ❖ 操作人员应佩戴防护用具(请参照相关国家行业规范)。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 如本品不慎入眼,请用大量水冲洗,如仍不适请及时就医。
- ❖ 手术器械用后需彻底清洗。

### 运输和贮存条件:

- ❖ 运输时应轻装轻卸,不得倒置,防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温(10-30℃),避光,置于阴凉、干燥、通风处保存。

**产品有效期:** 6年。

**产品执行标准:** Q/DLE 014

**产品包装规格:** 240mL/瓶,6瓶/箱。

