



## 易博士器械黄斑去除剂说明书

### 主要有效成分：

产品由有机酸、无机酸、表面活性剂、缓蚀剂、螯合剂等组成。

### 产品特点：

- ❖ 可快速高效去除因碘伏药渍等的长期浸泡，或长期清洗不彻底反复高温导致的不锈钢器械表面黄斑，使用后器械表面光亮如新；
- ❖ 操作简便，常温下即可使用；
- ❖ 不会对器械造成损害，无异味，安全环保，可生物降解。

### 适用范围：

适用于弯盘、换药碗等不锈钢器械表面黄斑的去除。

### 使用方法：

- ❖ 将本产品与纯水按1:4比例稀释。
- ❖ 将待洗器械在室温下浸泡1-3分钟后取出，使用纯水充分漂洗干净。  
(备注：根据污染程度适当调整稀释比例和浸泡时间，避免与硅胶、橡胶等材质的接触)。

### 注意事项：

- ❖ 操作人员应佩戴防护用具（请参照相关国家行业规范）。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 如本品不慎入眼，请用大量水冲洗，如仍不适请及时就医。

### 运输和贮存条件：

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

**产品有效期：** 24个月。

**产品执行标准：** Q/DLE 001

### 产品包装规格：

5L/桶，4桶/箱；2.5L/桶，6桶/箱。

