



易博士钢材回春剂（粉末）说明书

产品特点：

- ❖ 消除氧化造成的变色表层，使手术器械光亮如新，同时在手术器械表面形成保护膜；
- ❖ 无任何刺激气味，对使用者无健康危害。

适用范围：

本产品适用于各类不锈钢器械、不锈钢表面、不锈钢器皿。

使用方法：

1. 建议水温：常温即可，水温越高越有助于除锈和恢复钢材原有光泽。
2. 操作方法：
用湿纱布沾取粉末擦拭不锈钢或以 1:200 的比例配制溶液，将器械完全打开浸泡 2 分钟，锈蚀严重的地方可用刷子沾取粉末或稀释后的溶液刷洗。除锈后用纯化水冲洗干净。

注意事项：

- ❖ 操作人员应佩戴防护眼罩、防水罩袍和手套。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 如清洗剂不慎入眼，请用水大量冲洗并就诊。
- ❖ 贮存过程中，应防止产品斜置或倒置。

产品运输和贮存条件：

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

有效期： 24 个月。

产品执行标准： Q/DLE 001

产品包装规格： 100g/瓶

