



易博士除锈剂说明书

主要有效成分:

产品由植物酸、表面活性剂和高效缓蚀剂组成。

产品特点:

- ❖ 可迅速去除金属表面锈斑，并可渗透溶解碳酸盐等沉积物；
- ❖ 医用级除锈剂，有效降低器械返锈率，延长手术器械的使用寿命；
- ❖ 除锈快速安全，节省大量器械的更新费用；
- ❖ 产品环保，所有成分均可生物降解。

适用范围:

产品适用于各类不锈钢器械和器皿表面的手工浸泡除锈。

使用方法:

- ❖ 稀释比例：手工除锈 1:5-10（200-100mL 除锈剂/1L 水）。
- ❖ 建议水温：50-80℃，在此范围内温度越高除锈效果越好。
- ❖ 操作方法：
完全打开器械关节后置于配比液中 5 分钟以上，（依据锈蚀程度适当延长浸泡时间）。在器械严重锈蚀时可使用专业器械刷刷洗除锈，并可重复该步骤，以达到最佳效果。

注意事项:

- ❖ 操作人员应佩戴防护用具（请参照相关国家行业规范）。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 如本品不慎入眼，请用大量水冲洗，如仍不适请及时就医。

运输和贮存条件:

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

产品有效期：24 个月。

产品执行标准：Q/DLE 001

产品包装规格:

5L/桶，4 桶/箱。

