



## 易博士水垢去除剂说明书

### 主要有效成分:

产品由水溶性植物酸、无机酸、缓蚀剂等组成。

### 产品特点:

- ❖ 可有效去除器械表面、管腔的水垢，并能有效抑制金属锈蚀和水垢的形成；
- ❖ 具有广泛的材料相容性，适合多种材质的除垢；
- ❖ 产品环保，所有成分均可生物降解。

### 适用范围:

本品适用于手工、超声波清洗机对手术器械等表面水垢的去除。

### 使用方法:

- ❖ 稀释比例：  
手工除垢 1:10 (100mL 除垢剂/1L 水)；  
超声除垢 1:50 (20mL 除垢剂/L 水)
- ❖ 建议水温：50-80℃
- ❖ 操作方法：  
【手洗】完全打开器械关节后置于配比液 5 分钟以上，(依据水垢程度适时延长浸泡时间)。配合专业器械刷刷洗除垢，以达到最佳效果。  
【机洗】清洗机除垢时，可将本品置于弯盘内，置于清洗机中，启动清洗程序即可。

### 注意事项:

- ❖ 操作人员应佩戴防护用具 (请参照相关国家行业规范)。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 如本品不慎入眼，请用大量水冲洗，如仍不适请及时就医。

### 运输和贮存条件:

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温 (10-30℃)，避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

产品有效期：24 个月。

产品执行标准：Q/DLE 001

产品包装规格：5L/桶，4 桶/箱。

