



易博士碱性清洗剂（BASIC TYPE）说明书

主要有效成分：

产品由苛性碱、非离子表面活性剂、阴离子表面活性剂、螯合剂、缓蚀剂等组成。

产品特点：

- ❖ 产品可有效去除器械表面脂类及其他有机无机污染物；
- ❖ pH 值碱性（ ≥ 7.5 ），低泡配方易漂洗，安全无残留；
- ❖ 产品环保，所有成分均可生物降解。

适用范围：

适用于手工、喷淋与超声波清洗机的清洗。

使用方法：

- ❖ 稀释比例：推荐配比1：270，最高稀释比例1：500，请根据清洗方式和水质酌情调整使用比例。
- ❖ 操作方法：
【手洗】浸泡5分钟后进行刷洗。
【机洗】直接放入机洗的清洁剂置入槽中并调整稀释比例即可。

注意事项：

- ❖ 产品呈碱性，不适用于橡胶及塑料制品的清洗。
- ❖ 操作人员应佩戴防护用具（请参照相关国家行业规范）。
- ❖ 避免与皮肤长时间直接接触。
- ❖ 产品颜色可能因长时间存放有变化，不影响正常使用。
- ❖ 如本品不慎入眼，请用大量水冲洗，如仍不适请及时就医。

运输和贮存条件：

- ❖ 运输时应轻装轻卸，不得倒置，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温（10-30℃），避光，置于阴凉、干燥、通风处保存。

产品有效期：24个月。

产品执行标准：Q/DLE 001

产品包装规格：5L/桶，4桶/箱。

