



医用粘尘垫说明书

产品特点：

- ❖ 本产品由环保材料制成，使用安全。
- ❖ 粘尘效果佳，可将车轮，鞋底等灰尘一次性粘掉。
- ❖ 易于撕取，使用方便。

使用方法：

- ❖ 使用时首先撕下背面的保护膜，然后将粘尘垫平整的贴在需使用的地面上，踏牢四边后撕掉第一层即可使用。
- ❖ 更换时间根据使用地点人员的流动性决定，一般粘性降低时应及时更换。
- ❖ 为便于使用，粘尘垫一角贴有页码标签，更换时沿页码标签撕去即可。

注意事项：

保持地面干燥、平整、踏脏后及时撕去上面的一层。

使用范围：

手术室、供应室、无菌间，隔离室，重症监护室等。

产品有效期： 5年

产品规格： 60cm×90cm/65cm×115cm，30 张/本，10 本/件

