



易博士内窥镜专用清洗刷说明书

产品特点：

- ❖ 刷头顶端采用圆头设计，减小刷洗阻力，清洗同时不损伤内镜。
- ❖ 刷毛强度高、弹性强，超强去污不掉毛，对内镜无损伤。
- ❖ 选用优良材质，安全放心，种类多样，满足临床不同需求。

适用范围：

适用于内窥镜（支气管镜、胆道镜、胃肠镜等）工作通道清洗。

使用方法：

管道清洗刷：将刷毛一端插入内窥镜通道端口，然后推送进入通道，多次拉动手柄使刷毛通过管腔至达到刷洗效果。

管口清洗刷：将清洗刷插入管道口，旋转刷洗内镜管口至达到刷洗效果。

注意事项：

- ❖ 操作人员应佩戴防护用具（请参照相关国家行业规范）。
- ❖ 可重复使用清洗刷使用后应清洗干净，高水平消毒后备用。
- ❖ 一次性使用清洗刷禁止重复使用。
- ❖ 请严格按照《软式内镜清洗消毒技术规范（WS 507）》进行清洗操作。
- ❖ 防止强酸、强碱及其它腐蚀性溶液的长期接触。

运输和贮存条件：

- ❖ 运输时应轻装轻卸，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 置于干燥、通风处保存。

产品规格：见下表

序号	产品名称	产品规格（mm）			单位	用途
		毛外径	有毛位置	总长		
1	内窥镜清洗刷（rpt.）	3	10	1800	支	管道清洗刷 （可重复使用）
2	内窥镜清洗刷（one-off）	5	20	1800	支	管道清洗刷 （一次性使用）
3	内窥镜清洗刷 （one-off/Olympus）	5	20	1800	支	管道清洗刷 （一次性使用）
4	内镜管口清洗刷	10	40	55	支	管口清洗刷 （可重复使用）

