



易博士医用清洗刷说明书

产品特点：

- ❖ 采用不锈钢金属丝和进口杜邦刷毛材质，刷毛吸水量低，硬度适中，不伤器械。
- ❖ 手感舒适，结构合理刷毛强度高，弹性佳，不仅能够有效清除器械缝隙中较难刷洗的部位，还可以降低在手工刷洗过程中对器械的损害。
- ❖ 尤其管腔类清洗刷头前段有特殊工艺包裹处理，防止在刷洗过程中对管腔内壁的损伤。
- ❖ 耐久性高，刷毛强韧，使用寿命长，多种规格适合不同器械的刷洗要求。

适用范围：

适用于各类管腔内部难以清洗处的清洗；普通器械表面及关节处的清洗。

使用方法：

将待清洗的手术器械浸入医用清洗剂后，在水下进行刷洗，管腔器械的清洗应选择合适的清洗刷进行内腔清洁过程。

注意事项：

- ❖ 操作人员应佩戴防护用具（请参照相关国家行业规范）。
- ❖ 请严格按照消毒技术规范进行清洗操作。
- ❖ 防止强酸、强碱及其它腐蚀性溶液的长期接触。

运输和贮存条件：

- ❖ 运输时应轻装轻卸，防压、防撞、防挤、防止暴晒、冷冻和雨淋。
- ❖ 室温 10-30℃，置于阴凉、干燥、通风处保存。





产品规格：如下表

序号	产品名称	产品型号	产品规格 (mm)			单位	用途
			毛外径	有毛位置	总长		
1	腔镜专用杜邦毛刷	E3-2	3	120	320	支	腔镜刷
2	腔镜专用杜邦毛刷	E3-4	9	120	320	支	腔镜刷
3	腔镜专用杜邦毛刷	E3-5	11	120	320	支	腔镜刷
4	腔镜专用杜邦毛刷	E3-6	13	120	320	支	腔镜刷
5	腔镜专用杜邦毛刷	E3-7	15	120	320	支	腔镜刷
6	腔镜专用杜邦毛刷	E5-1	3	120	550	支	腔镜刷
7	腔镜专用杜邦毛刷	E5-2	6	120	550	支	腔镜刷
8	腔镜专用杜邦毛刷	E5-3	9	120	550	支	腔镜刷
9	腔镜专用杜邦毛刷	E5-4	11	120	550	支	腔镜刷
10	人流吸引专用杜邦毛刷	E3-3	6	120	320	支	人流引管刷
11	呼吸管道杜邦毛刷	E7-7	35	150	700	支	呼吸管道刷
12	湿化瓶刷	E2-8	60	100	220	支	湿化瓶刷
13	普通器械刷	E2-6	15	80	220	支	板刷
14	红柄除锈毛刷	E8-1	13	55	190	支	红柄除锈刷
15	白柄杜邦毛刷	E8-2	15	35	180	支	白柄刷
16	双头杜邦毛刷	E8-3	15/13	45/35	220	支	双头刷
17	洗手刷	E8-4	15	90	110	支	洗手刷

