

## 爱必适®复合季铵盐消毒液说明书

[主要原料] 水、双癸基二甲基氯化铵、苯扎溴铵、增效剂、去污剂等。

[主要有效成分及其含量] 总季铵盐含量 0.21%-0.26% (w/w)。

[杀灭微生物类别] 可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌和医院感染常见细菌。

[使用范围] 适用于医疗卫生机构、学校、托幼机构、公共场所、家庭等的物品、用具、器械和设施的表面，以及墙面和地面的消毒。

[使用方法] 用原液擦拭或喷洒作用 10min。对于重垢表面，建议事先清洗，再用本品进行消毒。

[注意事项]

- 1、外用消毒剂，不得口服，置于儿童不易触及处；
- 2、避免接触有机物和拮抗物。不能与肥皂或其他阴离子洗涤剂同用，也不能与过氧化物（如过氧化氢）、高锰酸钾、磺胺粉等同用；
- 3、如出现不适，应立即用清水连续冲洗，如伤及眼睛应及早就医；
- 4、本品对不锈钢、铜、铝基本无腐蚀，对碳钢为中性腐蚀。

[贮存条件] 应室温、干燥、避光保存。

[执行标准编号] Q/DLE 016

[有效期] 24 个月

[产品规格] 500mL/瓶、3.78L/桶

[生产企业] 大连莱恩医疗工业有限公司

[地址] 辽宁省大连保税区庆港街 2-1 号

[电话] +86 0411 88163166

[邮箱] [market@lionindustry.cn](mailto:market@lionindustry.cn)

[网址] [www.lionmedical.cn](http://www.lionmedical.cn)

[消毒产品生产企业卫生许可证号] (辽)卫消证字(2019)第 0202 号  
生产批号、生产日期和限期使用日期见包装